

20 jednorazowych kompresów okulistycznych Do higieny okolic oczu u dorosłych i dzieci WYRÓB MEDYCZNY

Co to jest OZOLID[®] i do czego służy

To jednorazowe kompresy okulistyczne oddziałujące zabezpieczająco, nawilżająco i oczyszczająco na rzęsy i powieki, oparte na niezawierającym konserwantów ozonowanym oleju roślinnym, hypromelozie i liposomach. Produkt został opracowany specjalnie w celu mechanicznego usuwania z powiek i rzęs wydzielin oka, powstających w wyniku stanów zapalnych, takich jak zapalenie brzegów powiek czy zapalenie brzegów powiek i spojówek, do oczyszczania okolic oczu po operacji chirurgicznej bądź urazie oka zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

OZOLID[®] jest wskazany w połączeniu z terapiami chorób o podłożu alergicznym, zapalnym lub zakaźnym, takich jak zapalenie brzegów powiek, zapalenie brzegów powiek i spojówek, jęczmień itp.

OZOLID[®] jest również wskazany do codziennej higieny przed i po operacji chirurgicznej oka, w przypadku urazu okolic gałki ocznej oraz podczas leczenia niedrożności dróg łzowych.

Zastosowanie **OZOLID[®]** może zredukować ryzyko infekcji wywołanych przez bakterie znajdujące się w wydzielinach na powiekach i rzęsach oraz podczas przygotowania do operacji.

Ozonowany olej roślinny, hypromeloza i liposomy rozpuszczają i zmiękczają wydzieliny oczne, ułatwiając ich mechaniczne usunięcie.

Dzięki swojemu składowi, kompresy **OZOLID[®]** mogą być stosowane codziennie, w celu utrzymania prawidłowego stanu okolic oczu.

SKŁAD

Gaza z włókny nasączona roztworem zawierającym:

LipozonEye (niezawierający konserwantów ozonowany olej roślinny, liposomy), hydroksypropylometyloceluloza, kwas borowy, tetraboran sodu, sól disodowa EDTA, PHMB, woda dejonizowana.

SPOSÓB UŻYCIA

Po odpowiednim umyciu rąk, otwórz saszetkę i wyjmij kompres z gazy. Delikatnie przetrzyj gazą okolicę powieki, wykonując kilka drobnych okrężnych ruchów, aby umożliwić usunięcie wydzielin oczu i wszelkich innych osadów (kurz, brud itp.). W przypadku trudnych do usunięcia wydzielin lub stanów zapalnych dotyczących brzegów powiek (zapalenie brzegów powiek, zapalenie brzegów powiek i spojówek, jęczmień) zaleca się podgrzewanie zamkniętej saszetki przez kilka minut w ciepłej wodzie (40 °C), a następnie stosowanie gazy jako ciepłego kompresu. W przypadku obrzęku powiek zaleca się schłodzenie zamkniętej saszetki w lodówce przez co najmniej godzinę, a następnie nałożenie gazy na zamknięte powieki na kilka minut.

OSTRZEŻENIA

Należy używać jednego kompresu dla każdego oka. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przerwać stosowanie w przypadku widocznego podrażnienia lub nadwrażliwości na produkt. Gwarancja funkcjonalności i bezpieczeństwa produktu zapewniona jest tylko i wyłącznie jeśli opakowanie nie jest uszkodzone. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nigdy nie należy używać ponownie tego samego kompresu, natychmiast po użyciu należy go wyrzucić. Przeznaczone do stosowania zewnętrznego. Po użyciu należy właściwie zutylizować. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

W OPAKOWANIU

20 jednorazowych kompresów z gazy.

DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO