

I-MED Pharma I-RELIEF™

Maska na oczy I-MED Pharma I-RELIEF™ do terapii ciepłem i zimnem.

ULGA GDY ODPOCZYWASZ

Nie zawiera lateksu | Antyalergiczna

Wielokrotnego użytku, nadaje się do mycia
Trwała, umożliwiająca długie użytkowanie



SYMPTOMY



- Opuchnięte, zaczerwienione powieki
- Uczucie piasku pod powiekami, swędzenie, pieczenie lub szczypanie w okolicy oczu
- Łamliwe rzęsy
- Łuszczenie skóry wokół oczu
- Bolesne, łzawiące oczy
- Wrażliwość na światło
- Uczucie obecności ciała obcego
- Nieostre widzenie

DZIAŁANIE

- Stymulacja gruczołów tarczokowych (Meiboma) do produkcji wydzieliny
- Zapobieganie zbyt szybkiemu parowaniu łez
- Poprawa krążenia krwi
- Łagodzenie napięcia wokół oczu
- Zwiększenie komfortu

SYMPTOMY



- Bóle głowy
- Zatłokane ujścia zatok
- Nadmierne napięcie skóry twarzy
- Obrzęk lub opuchlizna wokół oczu
- Zaczerwienienie, zmęczenie i bolesność oczu

DZIAŁANIE

- Redukuje wrażenie „gorąca” w podrażnionych oczach
- Ograniczenie przepływu krwi dla redukcji zapalenia
- Ulga dla zmęczonych oczu
- Zwiększenie komfortu

WSKAZANIA DO STOSOWANIA I-RELIEF™

Maski na oczy I-RELIEF™ do terapii ciepłem lub zimnem należy używać w celu złagodzenia objawów związanych z:

- zapaleniem brzołóg powiek
- zespołem suchego oka (ZSO)
- dysfunkcją gruczołów Meiboma (MGD)
- jęczmieniem
- gradówką
- bólami głowy
- zatkaniem uść zatok
- nadmiernym napięciem skóry twarzy
- opuchlizną
- obrzękiem

SPOSÓB UŻYCIA

Stosowanie ochronnej osłony pozwoli zachować maskę I-RELIEF™ w czystości i uniknąć zabrudzenia jej przez wydzieliny oka, makijaż, kurz itp.

W razie potrzeby, należy zdjąć osłonę i umyć maskę lub wyprać osłonę.

TERAPIA CIEPŁEM

Korzystaj z terapii ciepłem, by łagodzić objawy związane z zapaleniem brzołóg powiek, zespołu suchego oka (ZSO), dysfunkcją gruczołów Meiboma (MGD), jęczmieniem lub gradówką.

Instrukcja dla terapii ciepłem:

1. Maskę I-RELIEF™ musi mieć temperaturę pokojową.
2. Umieść maskę I-RELIEF™ na czystym talerzu kuchenki mikrofalowej.

Opcjonalnie, przed umieszczeniem w kuchence mikrofalowej, załóż osłonę ochronną.

3. Ustaw moc kuchenki na wysoką i podgrzewaj maskę I-RELIEF™ przez 20 sekund. Przed założeniem, **zawsze sprawdź temperaturę maski**, dotykając jej dłońmi. Jeśli maska I-RELIEF™ jest za gorąca, pozwól jej stygnąć przez 1-2 minuty, po czym ponownie sprawdź jej temperaturę, dotykając jej dłońmi. Jeśli maska jest chłodna, podgrzewaj ją w interwałach po 5 sekund, aż do osiągnięcia żądanej temperatury maski.

Nigdy nie należy podgrzewać dłużej niż 30 sekund.

4. Nałóż maskę I-RELIEF™ na zamknięte powieki i dopasuj pasek.
5. Pozostaw maskę I-RELIEF™ na powiekach przez 3 do 5 minut lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Nigdy nie stosuj przez dłużej niż 20 minut w jednej sesji.

TERAPIA ZIMNEM

Korzystaj z terapii zimnem, by łagodzić bóle głowy, zatkane ujścia zatok, napięcie, obrzęk lub opuchliznę.

Instrukcja dla terapii zimnem:

1. Spakuj maskę I-RELIEF™ do foliowej torebki i umieść ją w zamrażarce na 30 minut. Opcjonalnie, przed umieszczeniem w zamrażarce, załóż osłonę ochronną.
2. Wyjmij maskę I-RELIEF™ z zamrażarki i z foliowej torebki. Nałóż maskę na zamknięte powieki, dopasuj pasek, by umocować maskę.
3. Noś maskę I-RELIEF™ przez 5 do 7 minut, zgodnie z zaleceniem lekarza.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I KONSERWACJI

Pielęgnacja maski I-RELIEF™

Zdejmij osłonę ochronną. Myj wyłącznie ręcznie, w zimnej wodzie, z użyciem łagodnego detergentu. Dokładnie optucz. Delikatnie wyćmiś nadmiar wody (nie skręcaj ani nie wyżyмай maski). Ułóż maskę I-RELIEF™ płasko na czystej powierzchni w dobrze wentylowanym miejscu. Pozostaw na co najmniej 24 godziny lub do całkowitego wyschnięcia. Umyj maskę I-RELIEF™ natychmiast, jeśli została narażona na zanieczyszczenie przez żywność, olej, smar lub inne zabrudzenie.

Pielęgnacja osłony ochronnej

Pierz w pralce, w ciepłej wodzie, z użyciem programu dla ubrań kolorowych oraz zwykłego detergentu do prania. Jeśli korzystasz z suszarki, ustaw niską temperaturę suszenia. Pierz tak często, jak jest to konieczne.

Przechowywanie

Przechowuj maskę I-RELIEF™ w chłodnym i suchym miejscu. Chroni maskę przed otwartym ogniem.

OSTRZEŻENIA

Przed użyciem maski I-RELIEF™ przeczytaj uważnie wszystkie ostrzeżenia.

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie stosować dłużej niż 20 minut w jednej sesji.
- Jeśli maska I-RELIEF™ zostanie przebita lub rozdarta, należy ją wyrzucić.
- Zawsze należy sprawdzać temperaturę maski I-RELIEF™, dotykając jej dłońmi przed założeniem na oczy.
- Przegrzanie lub długotrwałe stosowanie może spowodować obrażenia lub uraz.
- Nie stosować w niemowląt.
- Nie nakładać na wrażliwą skórę, skórę bez czucia lub otwarte rany.
- Nie gotować.
- Przegrzanie w kuchence mikrofalowej może uszkodzić maskę I-RELIEF™.
- Nie polykać wypełnienia.
- Ogrzewać zgodnie z instrukcjami. Nie nakładać, jeśli maska jest zbyt gorąca.
- Nie należy zasypiać z założoną maską I-RELIEF™.
- Osoby z cukrzycą, zaburzeniami krążenia, infekcjami skóry itp. powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Jeśli stan się pogorszy lub wystąpi podrażnienie, należy skonsultować się z lekarzem.

Maska do terapii na gorąco i na zimno I-RELIEF™ z ThermoBeads™ będzie najbardziej skuteczna, gdy zostanie zastosowana jako część terapii połączonej z kroplami ocznymi I-DROP® MGD oraz produktami z linii I-LID™ N LASH®.

Opakowanie zawiera 1 maskę na oczy I-RELIEF™ o wymiarach 8,6 x 3,5" (22 cm x 9 cm) i 1 osłonę z tkaniny ochronnej.



Dystrybucja w Polsce:
InView Medical,
Pl. Powstańców Śląskich 17a/222
53-329 Wrocław
tel. 71-787-75-43