

# OZODROP®

## GEL

Nawilżający i ochronny  
**ŻEL OKULISTYCZNY**

**6 ml**

**Ozodrop® Gel** to ochronny, natłuszczający, nawilżający i kojący żel okulistyczny na bazie LipozonEye (ozonowany olej roślinny, fosfolipidy sojowe), hydroksyetylocelulozy (HEC) i kolliphor-u. Obecność oleju roślinnego i liposomów sprzyja stabilizacji warstwy lipidowej filmu łzowego, zmniejszając parowanie warstwy wodnej filmu łzowego i zapewniając natychmiastową ulgę dla oczu.

Co więcej, **Ozodrop® Gel** może tworzyć trwałą i jednolitą warstwę na powierzchni rogówki.

### **WSKAZANIA**

Dzięki ochronnemu, natłuszczającemu i nawilżającemu działaniu swoich składników, **Ozodrop® Gel** jest przydatny w leczeniu zespołu suchego oka, nawet w przypadku podrażnień wywołanych warunkami środowiskowymi czy obciążeniami mechanicznymi, takimi jak noszenie soczewek kontaktowych.

Ponadto żel **Ozodrop® Gel** tworzy trwałą i jednolitą warstwę na powierzchni oka, przydatną:

- w ochronie przed zmianami na powierzchni oka (urazowymi, abrazyjnymi, pooperacyjnymi itp.), wspomagając fizjologiczne procesy naprawcze;
- w leczeniu objawów związanych z chorobami zapalnymi, również o podłożu zakaźnym.

### **SPOSÓB UŻYCIA**

Nakładaj jedną lub dwie krople do każdego oka, 3-4 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

### **SKŁADNIKI**

LipozonEye (samokonserwujący się ozonowany olej roślinny, fosfolipidy sojowe), hydroksyetyloceluloza, kwas borowy, tetraboran sodu, wersenian disodowy, PHMB, kolliphor P407 i woda demineralizowana.

Produkt można stosować podczas noszenia soczewek kontaktowych.

## OSTRZEŻENIA

- Przed użyciem produktu, dokładnie umyj ręce;
- Nie stosuj produktu w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników;
- Zadbaj, by końcówka butelki nie miała kontaktu z okiem;
- Po każdym użyciu zadbaj, by butelka była dobrze zamknięta;
- Nie używaj produktu po 30 dniach od otwarcia butelki;
- Zaraz po zakropieniu, działanie produktu może powodować lekkie i chwilowe zamglenie widzenia, przed rozpoczęciem czynności wymagających pełnej zdolności widzenia, należy poczekać, aż objawy znikną;
- Produkt należy podawać co najmniej 5 minut przed lub 5 minut po podaniu innych produktów okulistycznych do stosowania miejscowego;
- Przechowuj produkt w temperaturze od 5 do 25 °C;
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, przerwij stosowanie produktu i skonsultuj się z lekarzem;
- Nie połykaj;
- Trzymaj z dala od źródeł ciepła;
- Chronić przed dziećmi;
- Nie używaj produktu po upływie terminu ważności;
- Nie używaj produktu, jeśli opakowanie wydaje się naruszone;
- Sterylne do pierwszego otwarcia.



STERILE A



**FBvision**  
OPHTHALMIC PHARMACEUTICALS

 FB Vision srl  
via Piceno Aprutina, 47  
Ascoli Piceno - fb-vision.it